

Viudetta WC-bidee (CE-hyväksytty lääkinällinen apuväline)

Ohjeita tilaajalle, asentajalle ja käyttäjälle

Käyttäjä

- käyttäjän oltava itse motivoitunut apuvälineen käyttämiseen
- käyttäjän tulee päästä istumaan hyvin wc-istuimelle, perille (taakse) saakka ja istumaan ryhdikkäässä suorassa pystyasennossa
- hän pystyy ohjaamaan pesutapahtumaa kaukosäätimestä, tai painamaan erillistä ohjelmoitavaa jalkakäynnistysnappia
- maksimipainoraja 120 kg, wc-bideelle on istuttava sitä voimakkaasti rasittamatta, ei vääntöä eikä laitteen päälle saa istua ”rysähtäen”
- käyttäjä perehtyy wc-bideen käyttöön itse (videot, ohjekirja ym.), tai hän saa apua avustajalta
- joskus käyttöönotto vaatii alan ammattilaisen, kuten fysioterapeutin tai toimintaterapeutin apua

WC-tila

- mittaa wc-istuimen B-mitta, katso kuva (onko yli vai alle 42 cm)
- mikäli mahdollista, ota muutama kuva seuraavista: wc-tila, maadoitettu pistoke ja wc-istuin
- asennukset eivät vaadi yleensä taloyhtiöltä lupaa
- wc-tilan ennallistaminen helppoa

Tuotteet

Tilataan

- Pesevä ja kuivaava wc-bidee (mitta B =)
- Korokerengas (4 cm)
- Korokerengas (6 cm)
- Käsinojat napilla
- Jalkakäynnistysnappi
- Hygieniasuoja (estää virtsan pääsyn lattialle)
- Sähköllä toimiva wc-nostin, vertical (pystysuora)
- Sähköllä toimiva wc-nostin, tilt-/kallistuva
- Sähköllä toimiva wc-nostin, vertical, kompakti




Jasmin Care pesevä ja kuivaava wc-bidee on lääkinnällisen laitteen saanut CE-hyväksytyt apuväline. Lisätietoa ja ohjeita p. 0400 707283.

Edut: voidaan asentaa kaikkiin olemassa oleviin wc-istuimiin, asennusaika yleensä tunti, on heti käyttövalmis, lisävarusteina saatavana korottajat, käsinojat, erillinen yhden painalluksen automatisoitu pesu/kuivauspainike, sähköinen wc-nostin jne. Katso lisää tuote-esitteestä: Jasmin Care tuotteet ja hinnat.

LVI-ammattilainen liittää wc-bideen t-liittimellä wc-istuimen kylmävesituloon (laite lämmittää pesuveden halutun lämpöiseksi) ja lisäksi tarvitaan maadoitettu sähköpistoke, laitteen sähköjohdon pituus 1,5 m. Roiskesuojaluokka on IPX4, 8A-sulake riittää.

Jasmin Care wc-bideetä on kahta kokoa:

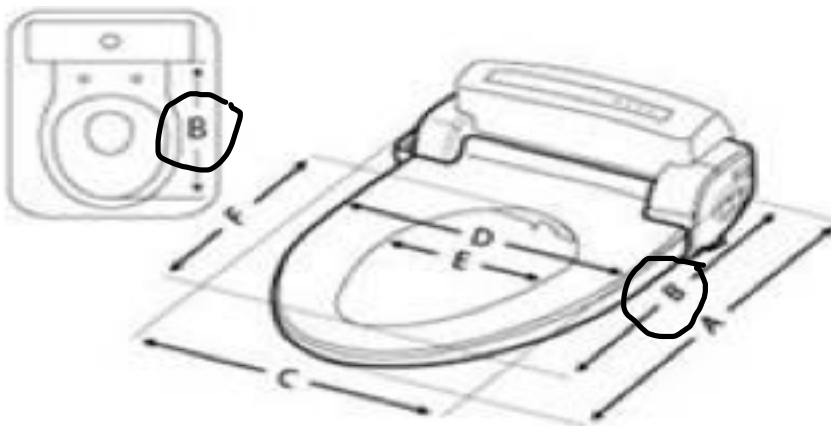

Huom! Mitta B mitataan vesisäiliön etuseinästä istuinrenkaan etuisäreunaan!

Pienempi malli (round) voidaan asentaa kaikkiin wc-istuimiin. Tässä mallissa wc-istuimen rengas on noin 2,5 cm lyhyempi kuin se, johon olemme tottuneet. Renkaan aukon pituus (F) on 26 cm ja leveys (E) 20 cm.

Isommassa XL-mallissa (elongiated) wc-istuimen rengas on samankokoinen kuin se, johon olemme tottuneet. Renkaan aukon pituus (F) on 29 cm ja leveys (E) 20,5 cm.

Isompi malli voidaan asentaa wc-istuimeen:

- mikäli mitta B on 44 cm tai enemmän
- käyttäen lisäksi hygieniasuojaa, mikäli mitta B on 42,5 cm tai enemmän

- korokerengaan kanssa, mikäli mitta B on 42 cm tai enemmän
- isompaa mallia voidaan käyttää, mikäli mitta B on alle 44 cm, mutta tällöin istuvuus ei ole täydellinen ja istuinrenkaan alta näkyy wc-istuimen posliinia

Korokerengasta löytyy sekä 4 cm että 6 cm korkeana ja näitä voidaan käyttää myös Viudetan käsinojen kanssa. Erillinen käynnistysnappi, joka pesee ja kuivaa ennalta säädetyn ohjelman mukaan voidaan asentaa joko erillisenä lattialle tai seinään. Käsinojan päässä on myös käynnistysnappi.

Vinkki asentajalle: Mikäli korokerengas tai hygieniasuoja eivät ihan mahdu wc-istuimeen, voi asentaja lämmittää muovia hiukan kuumailmapuhaltimella varovasti niin, että pehmitessään (muutaman millin) ne mahtuvat ja asettuvat paremmin wc-istuimeen.

Käyttöönotto

Kun wc-bidee on asennettu LVI-ammattilainen toimesta, tarkistetaan että wc-bidee istuu hyvin ja tukevasti wc-istuimessa ja että tilatut lisävarusteet on asennettu. Tämän jälkeen on hyvä kokeilla, että kaikki toimii teknisesti. Asentaja ei ole välttämättä perehtynyt laitteen käyttöön eikä näin ollen ole oikea henkilö antamaan opastusta wc-bideen käytön suhteen. Kannattaa perehtyä käyttöohjekirjaan, videoon ja hankkia tietoa wc-bideen käytöstä, jotta käyttöönotto sujuu hyvin. WC-bideetä ei tarvitse ”pelätä” eikä se mene rikki nappeja painamalla. Mikäli käytät erillistä ohjelmoitua käynnistysnappia, on ohjelma esiohjelmoitu eikä sitä tarvitse muuttaa.

Käyttöönotto ja tutustuminen bideeseen kannattaa aloittaa heti määrätietoisesti. Varsinainen pesuvesi tulee hetken kuluttua napin painalluksesta pesusuuttimesta sen jälkeen, kun suutin on ensin pesty puhtaaksi laitteessa. Tämä suuttimen pesuvaihe pitää vähän ääntä, vettä valuu wc-istuimen kulhoon ja vie aikaa hetken (n. 15 sekuntia). Vasta tämän jälkeen alkaa varsinaista pesuvettä tulla suuttimesta ja käyttäjä tuntee, minne vesisuihku osuu. Huomaa, että vesisuihku on tarkkaan suunnattu ja melko pieni, mutta painetta voidaan säätää. Pesu korvaa siis wc-paperin käytön. Tässä vaiheessa on hyvä harjoitella oikeata pesuasentoa, jota voi kokeilla esimerkiksi tekemällä istuimessa pientä liikettä, jotta vesi osuu oikeaan paikkaan (kallistu hiukan taakse- tai eteenpäin), mutta jos liike on liian suurta tai laite tulkitsee, että käyttäjä nousee laitteesta pois, katkaisee laite pesutapahtuman. Käyttöönotto ja opettelu on yksilöllistä ja kestää muutamasta käyttökerrasta aina useaan viikkoon. Mikäli käyttö tuntuu alussa hankalalta omatoimisen käyttöönoton jälkeen, kannattaa pyytää apua

mahdolliselta avustajalta tai muulta alan asiantuntijalta kuten fysioterapeutilta tai toimintaterapeutilta.

Takuu

WC-bideellä on kahden vuoden laitetakuu, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. WC-bidee vaatii veden, joka on puhdasta ja vesijohtoverkon paineen tulee olla 1 - 4,5 bar. Laite tulee asentaa ohjeen mukaan, sitä tulee käyttää ohjeiden mukaan eikä takuu ole voimassa, mikäli WC-bideettä on käytetty vastoin ohjeita tai/ja se on rikkoutunut virheen tai vahingon johdosta. Takuu ei kata myöskään asennusvirheitä. Mikäli laitteessa havaitaan valmistus- tai materiaalivirhe, korjataan laite tai se vaihdetaan uuteen. Takuu ei kata asennus- tai matkakustannuksia. Koska laite on ns. hygienia-laite, ei sillä ole palautusoikeutta.